




สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คู่มือการใช้งานรถเข็นจ่ายยา.....	1
การตั้งค่าใช้งานในโหมด Bluetooth	1
การเลือกตีกผู้ป่วยและรถเข็นจ่ายยาสำหรับการใช้งาน	2
การเลือกแผนก/ตีกผู้ป่วย	2
การเลือกรถเข็นจ่ายยา.....	3
สถานะการเชื่อมต่อของรถเข็นจ่ายยาเมื่อเลือกตีกผู้ป่วยและรถเข็นจ่ายยาเรียบร้อยแล้ว	3
การใช้งานของรถเข็นจ่ายยา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน.....	4
1.การเติมยา	4
1.1.เข้าไปที่เมนูตรวจสอบ และ เติมนยา เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานการเติมยา โดยการกดปุ่ม “กดที่นี่เพื่อเติมนยา”	4
1.2.หลังจากกดเลือกเมนู “ตรวจสอบ และ เติมนยา” จะแสดงหน้าต่างรายการเตียง.....	4
1.3. ทำการสแกน QR Code ที่หน้าของยา หรือ กดเลือกจากที่หน้าจอ Tablet.....	5
1.4.เมื่อทำการสั่งเปิดลิ้นชักแล้ว จะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นเป็น “สีแดง” พร้อมทั้งแสดง “Order Sheet” จากทางด้านขวาของจอแสดงผล จากนั้นให้ทำการเปิดลิ้นชัก.....	5
1.5.หลังจากทำการเติมยาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดลิ้นชัก จากนั้นที่จอแสดงผลจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อยืนยันการเติมยา ให้ทำการกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเติมยาสำเร็จ	6
1.6.เมื่อกดยืนยันการเติมยาเรียบร้อยแล้ว จะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นเป็น “สีเขียว” เพื่อบอกว่าการเติมยาได้เสร็จสิ้นแล้ว	6
2.การจ่ายยา.....	7
2.1.เข้าไปที่เมนูตีกผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานการจ่ายยา โดยการกดปุ่ม “กดที่นี่เพื่อจ่ายยา”	7
2.2.หลังจากกดเลือกเมนู “ตีกผู้ป่วย” จะแสดงหน้าต่างรายการเตียง (รายการเตียงจะแสดงตามที่ได้ทำการตั้งเข้าเวรรับผิดชอบเอาไว้).....	7
2.3.ทำการสแกน QR Code ที่ Wrist Band คนไข้ หรือ กดเลือกจากที่หน้าจอ Tablet	8
2.4.ทำการเลือกช่วงเวลาที่จะทำการจ่ายยา.....	8
2.6.เมื่อกดเปิดลิ้นชักยาแล้ว จะมีสถานะขึ้นเป็น “สีแดง” จากนั้นดึงลิ้นชักออกเพื่อนำยาออกมาจ่าย	9
2.7.เลือกตัวยาที่ต้องการจ่าย หรือการสแกน QR Code ที่หน้าของยา เพื่อ “ยืนยัน” การจ่ายยาได้เช่นกัน.....	10
2.8.หลังจากเลือกตัวยาที่ต้องการจ่ายแล้วจะมีแจ้งเตือนขึ้นเพื่อ “ยืนยัน” การจ่ายยา (**การสแกน QR Code ที่หน้าของยา เพื่อ “ยืนยัน” จะไม่มีแจ้งเตือนให้กดยืนยัน**)	10
2.9.จากนั้นสถานะตัวยาจะเป็น “สีเขียว” เพื่อบอกว่าการจ่ายยาได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดลิ้นชัก	11

คู่มือการใช้งานรถเข็นจ่ายยา

การตั้งค่าใช้งานในโหมด Bluetooth



ก่อนเข้าใช้งานให้ทำการเลือกเป็น “โหมดรถเข็น” เพื่อใช้งานรถเข็นจ่ายยาในโหมด Bluetooth

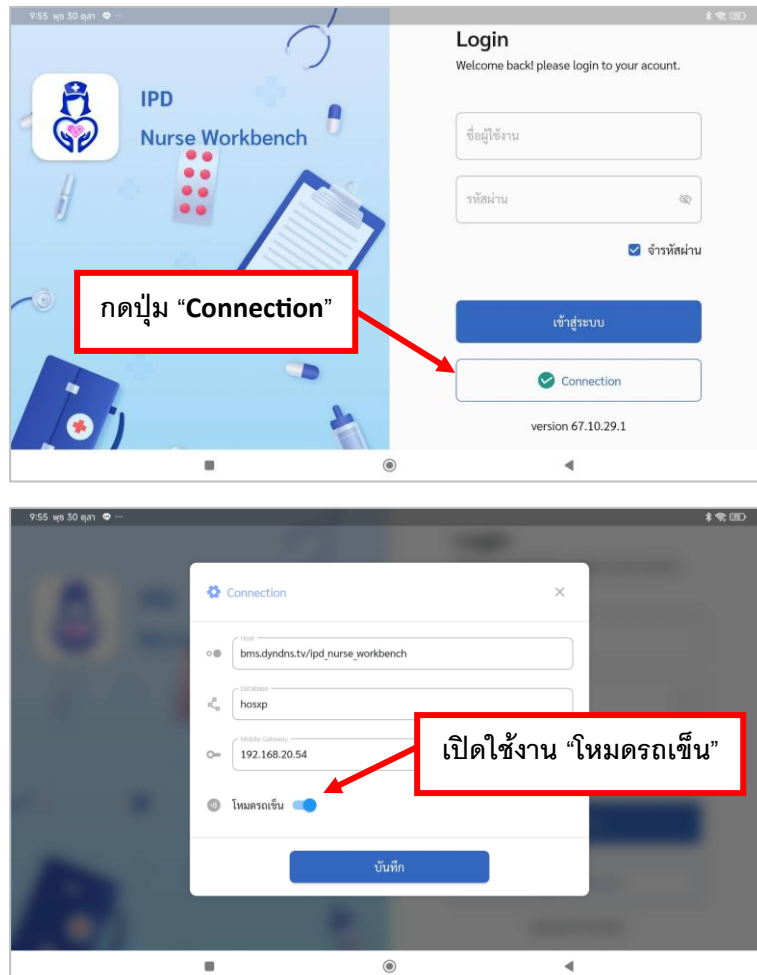



การเลือกติกผู้ป่วยและรถเข็นจ่ายยาสำหรับการใช้งาน

หลังจาก Log In ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกติกและรถเข็นจ่ายยาที่ต้องการจะใช้งานก่อน ไมเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้งานรถเข็นจ่ายยาได้ และเมื่อทำการเลือกเรียบร้อยแล้ว จะมีสถานะแสดงขึ้นเพื่อบอกว่ารถเข็นพร้อมใช้งานแล้ว


การเลือกแผนก/ติกผู้ป่วย

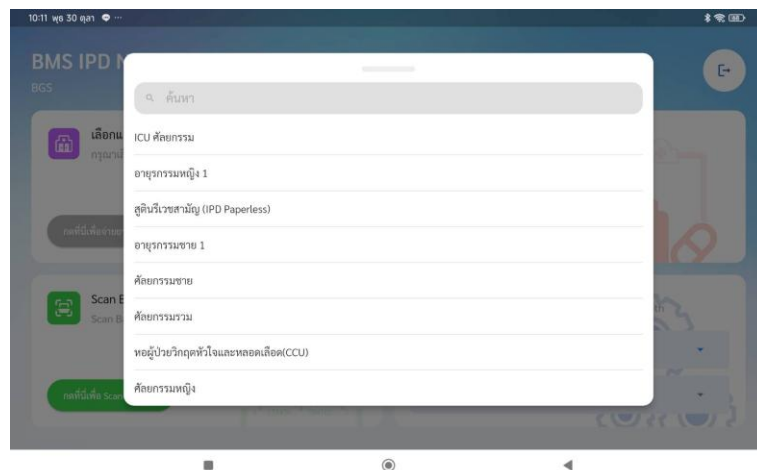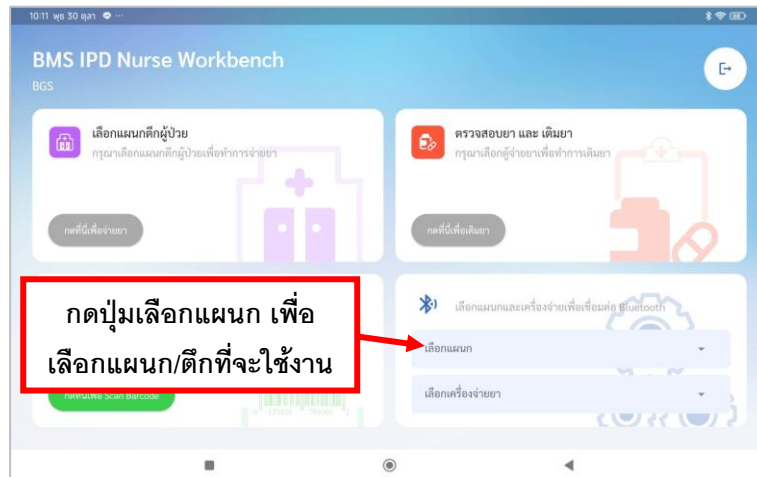

การเลือกรถเข็นจ่ายยา

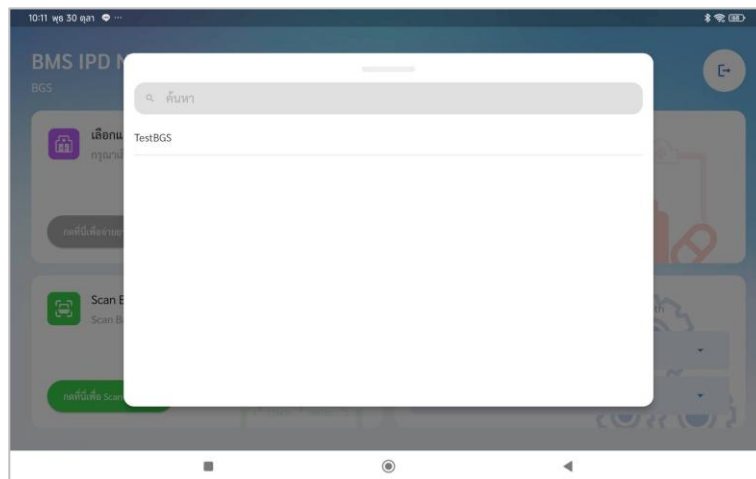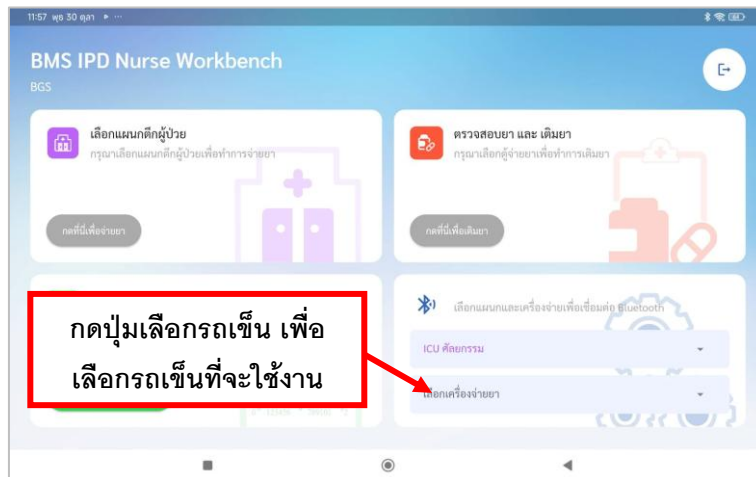

สถานะการเชื่อมต่อของรถเข็นจ่ายยาเมื่อเลือกตึกผู้ป่วยและรถเข็นจ่ายยาเรียบร้อยแล้ว

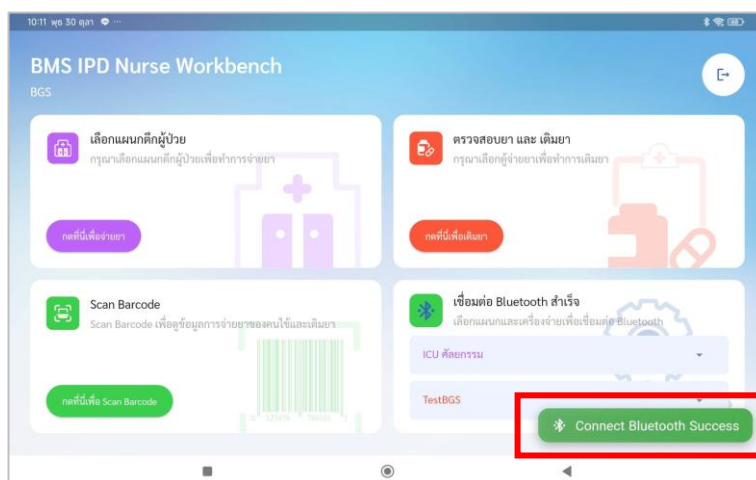


ข้อแนะนำ : หากไม่ทำการเลือกตึกผู้ป่วยที่จะใช้งานก่อน จะไม่สามารถเลือกรถเข็นจ่ายยาที่จะใช้งานได้
ดังนั้นให้ทำการเลือกตึกผู้ป่วย แล้วถึงจะเลือกรถเข็นจ่ายยาตามลำดับ

การใช้งานของรถเข็นจ่ายยา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน


1. การเติมยา (เมนูการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่เภสัชกร)
2. การจ่ายยา (เมนูการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล)

1.การเติมยา

1.1.เข้าไปที่เมนูตรวจสอบ และ เติมนยา เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานการเติมยา โดยการกดปุ่ม “กดที่นี่เพื่อเติมนยา”

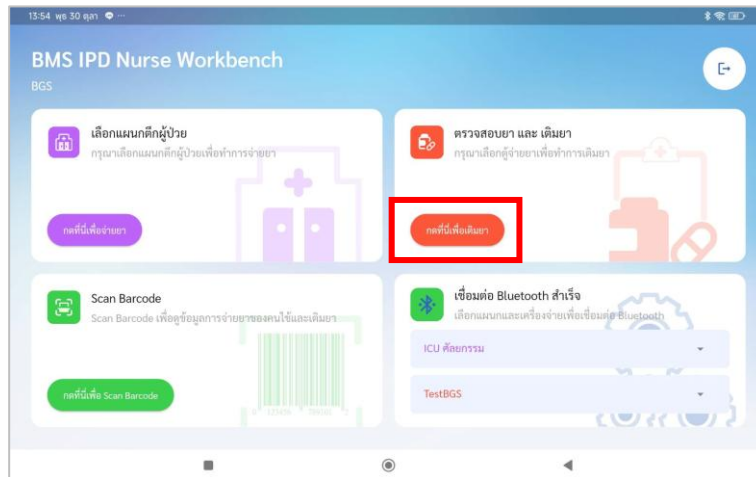

1.2.หลังจากกดเลือกเมนู “ตรวจสอบ และ เติมนยา” จะแสดงหน้าต่างรายการเตียง

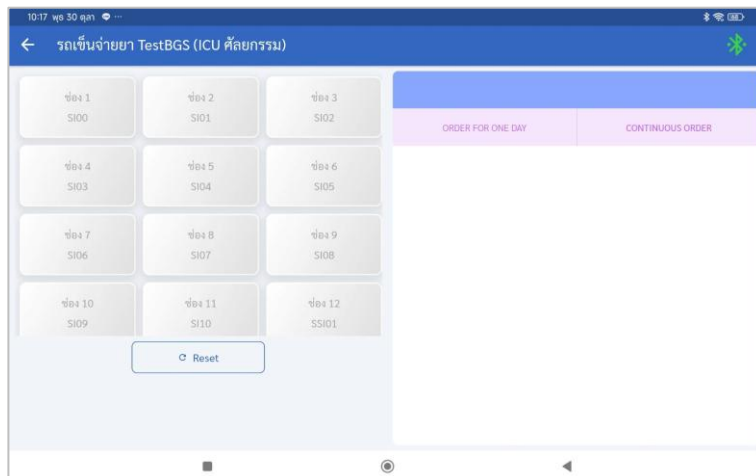

1.3. ทำการสแกน QR Code ที่หน้าซองยา หรือ กดเลือกจากที่หน้าจอ Tablet

3

ต.ค. 2564 16:13 02:อายุกรรมชาย 1 || MM114
จ : 000886965 AN : 630029920

) ยาฉีด-AMPHOTERICIN B INJ 50 MG-FUNGI
v infusion 35 มิลลิกรัม
และ 1 ครั้ง
ใน dextrose in water เท่านั้น
) conc 0.1mg/ml เก็บยานี้ในตู้เย็น

630029920



[1/1]

10:17 พุธ 30 ธ.ค. 100%

← รวบรวมจ่ายยา TestBGS (ICU ศัลยกรรม)

ช่อง 1 SI00	ช่อง 2 SI01	ช่อง 3 SI02
ช่อง 4 SI03	ช่อง 5 SI04	ช่อง 6 SI05
ช่อง 7 SI06	ช่อง 8 SI07	ช่อง 9 SI08
ช่อง 10 SI09	ช่อง 11 SI10	ช่อง 12 SI101

Reset

ORDER FOR ONE DAY CONTINUOUS ORDER

1.4. เมื่อทำการสั่งเปิดลิ้นชักแล้ว จะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นเป็น “สีแดง” พร้อมทั้งแสดง “Order Sheet” จากทางด้านขวาของจอแสดงผล จากนั้นให้ทำการเปิดลิ้นชัก

10:17 พุธ 30 ธ.ค. 100%

← รวบรวมจ่ายยา TestBGS (ICU ศัลยกรรม)

ช่อง 1 SI00	ช่อง 2 SI01	ช่อง 3 SI02
ช่อง 4 SI03	ช่อง 5 SI04	ช่อง 6 SI05
ช่อง 7 SI06	ช่อง 8 SI07	ช่อง 9 SI08
ช่อง 10 SI09	ช่อง 11 SI10	ช่อง 12 SI101

Reset

AN : 630027682 ชื่อ : นายรวิญ ทดสอบ เบียง : SI08

ORDER FOR ONE DAY CONTINUOUS ORDER


วันที่ 02/10/2567 15:19

Medication
ENALAPRIL 20 mg เม็ด >
แพทย์ : นายชิตวัฒน์ มีลาภ


วันที่ 02/10/2567 14:46

Medication
METFORMIN 500 mg เม็ด >
แพทย์ : นายชิตวัฒน์ มีลาภ

1.5.หลังจากทำการเติมยาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดลิ้นชัก จากนั้นที่จอแสดงผลจะมีแจ้งเตือนขึ้นมา เพื่อยืนยันการเติมยา ให้ทำการกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเติมยาสำเร็จ

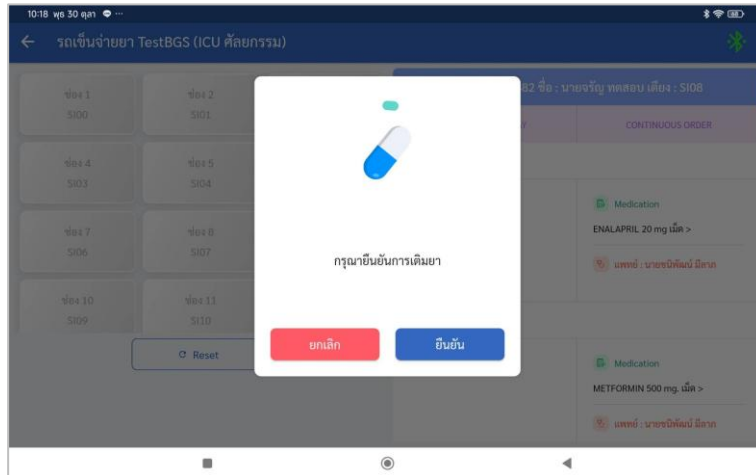


1.6.เมื่อกดยืนยันการเติมยาเรียบร้อยแล้ว จะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นเป็น “สีเขียว” เพื่อบ่งบอกว่าการเติมยาได้เสร็จสิ้นแล้ว

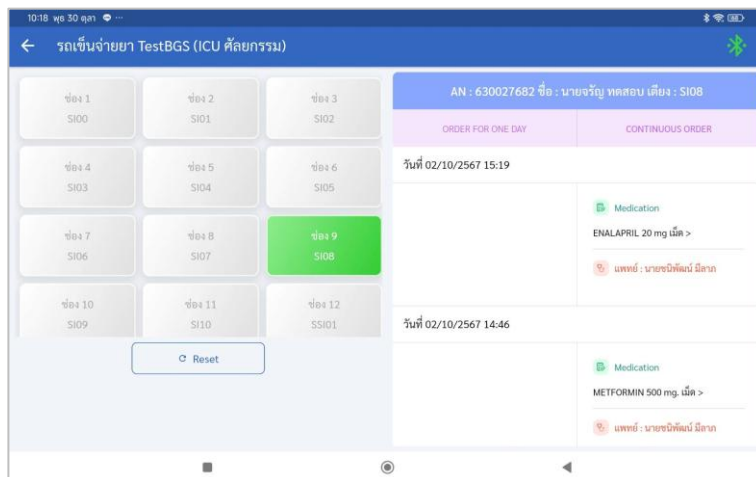


2.การจ่ายยา


2.1.เข้าไปที่เมนูตึกผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานการจ่ายยา โดยการกดปุ่ม “กดที่นี่เพื่อจ่ายยา”

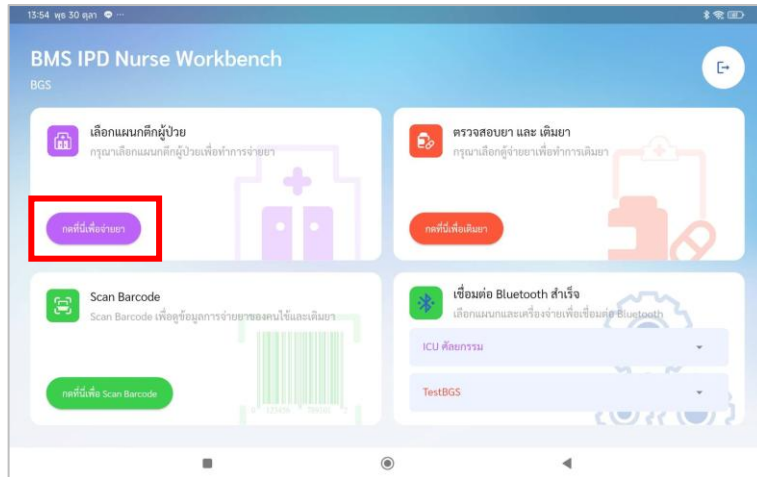


2.2.หลังจากกดเลือกเมนู “ตึกผู้ป่วย” จะแสดงหน้าต่างรายการเตียง (รายการเตียงจะแสดงตามที่ได้ทำการติ่งเข้าเวรรับผิดชอบเอาไว้)

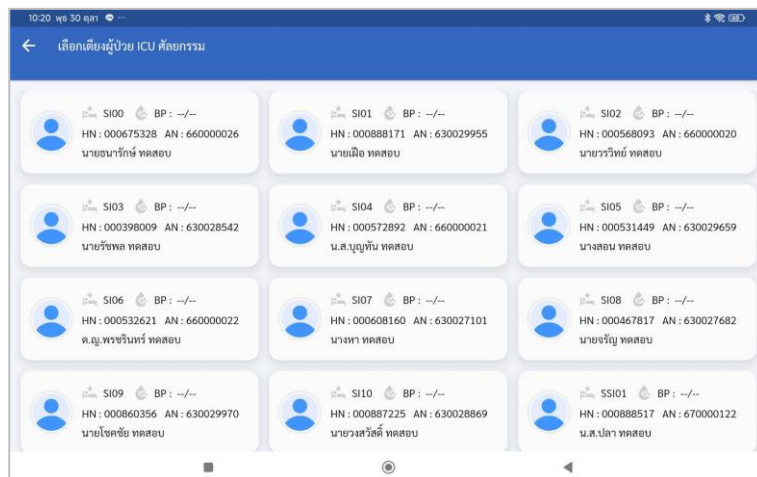


2.3.ทำการสแกน QR Code ที่ Wrist Band คนไข้ หรือ กดเลือกจากที่หน้าจอ Tablet

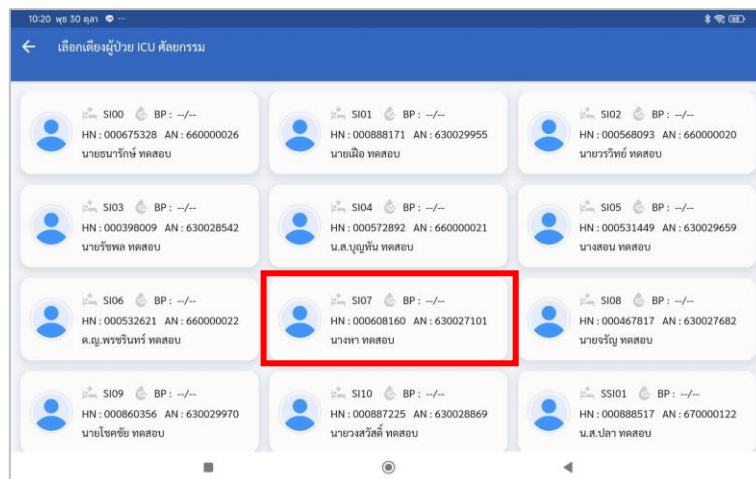

2.4.ทำการเลือกช่วงเวลาที่จะทำการจ่ายยา

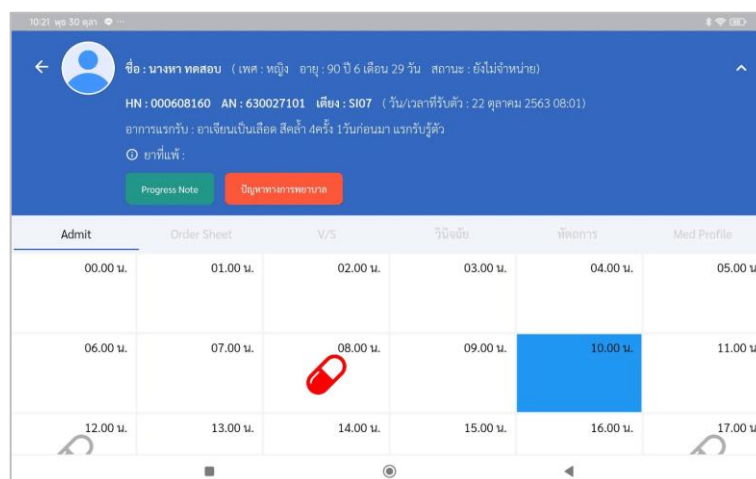

2.5.หลังจากเลือกช่วงเวลาแล้ว จะแสดงหน้ารายการยา จากนั้นให้ทำการกดเปิด “เปิดลิ้นชักยา”

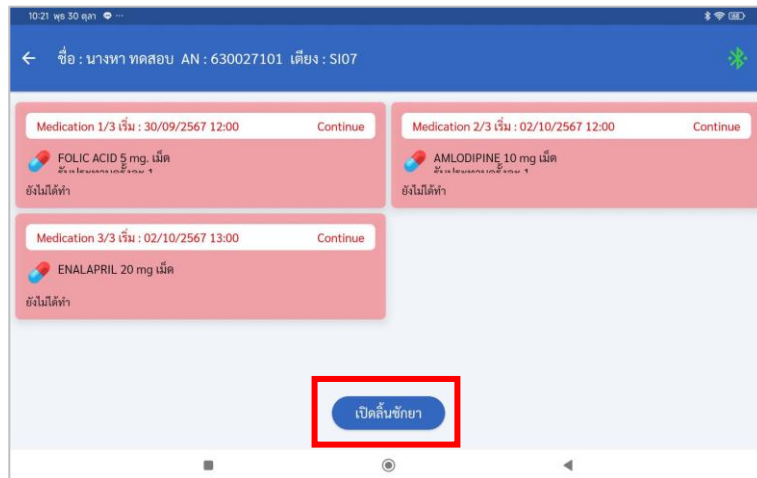

2.6.เมื่อกดเปิดลิ้นชักยาแล้ว จะมีสถานะขึ้นเป็น “สีแดง” จากนั้นดึงลิ้นชักออกเพื่อนำยาออกมาจ่าย



2.7.เลือกตัวยาที่ต้องการจ่าย หรือการสแกน QR Code ที่หน้าของยา เพื่อ “ยืนยัน” การจ่ายยาได้เช่นกัน

3

ต.ค. 2564 16:13 02:อายุรกรรมชาย 1 || MM114
↓:000886965 AN : 630029920

) ยาฉีด-AMPHOTERICIN B INJ 50 MG-FUNGI
v infusion 35 มิลลิกรัม 630029920
และ 1 ครั้ง
รมใน dextrose in water เท่านั้น
) conc 0.1mg/ml เก็บยานี้ในตู้เย็น [17]

14:25 พุธ 30 ธ.ค. 100%

← ชื่อ : นงา ทดสอบ AN : 630027101 เดียง : SI07

Medication 1/3 เริ่ม : 30/09/2567 12:00 Continue

FOLIC ACID 5 mg เม็ด
ยังไม่ได้ทำ

Medication 2/3 เริ่ม : 02/10/2567 12:00 Continue

AMLODIPINE 10 mg เม็ด
ยังไม่ได้ทำ

Medication 3/3 เริ่ม : 02/10/2567 13:00 Continue

ENALAPRIL 20 mg เม็ด
ยังไม่ได้ทำ

เปิดลิ้นชักยา

2.8.หลังจากเลือกตัวยาที่ต้องการจ่ายแล้วจะมีแจ้งเตือนขึ้นเพื่อ “ยืนยัน” การจ่ายยา (**การสแกน QR Code ที่หน้าของยา เพื่อ “ยืนยัน” จะไม่มีแจ้งเตือนให้กดยืนยัน**)

10:21 พุธ 30 ธ.ค. 100%

← ชื่อ : นงา ทดสอบ AN : 630027101 เดียง : SI07

Medication 1/3 เริ่ม : 30/09/2567 12:00 Continue

FOLIC ACID 5 mg เม็ด
ยังไม่ได้ทำ

Medication 3/3 เริ่ม : 02/10/2567 13:00 Continue

ENALAPRIL 20 mg เม็ด
ยังไม่ได้ทำ

ยืนยันการจ่ายยา

Medication
FOLIC ACID 5 mg เม็ด
รับประทานครั้งละ 1

Note ...

☐ ชำ Dose

ไม่ได้จ่าย ยืนยันจ่าย

เปิดลิ้นชักยา

2.9. จากนั้นสถานะตัวยาจะเป็น “สีเขียว” เพื่อบ่งบอกว่าการจ่ายยาได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดลิ้นชัก

